

みんなで作ってみよう！

『フェイスシールド』の作り方

※『フェイスシールド』とは？

透明なカバーで顔全体を覆うことができる道具です。(左の写真が装着例)
飛沫から目・鼻・口を守る役割があり、適切に使用をすれば感染症の予防に高い効果があると言われています。

幅広スポンジ

前面



スナップボタン

幅広ゴム



背面

装着例

※顔全体を覆うようにして装着します。


準備するもの

- ・A4透明フィルム
- ・幅広スポンジ(100円均一・ホームセンター等)
- ・スナップボタン(100円均一・手芸店等)
- ・幅広ゴム(100円均一・手芸店等)


※感染症予防には手洗いうがいを徹底し、3密を避けることが重要といわれています。

皆様の安全と健康、そして新型コロナウイルス感染症が一日でも早く終息することをお祈りいたしております。

穴をあける

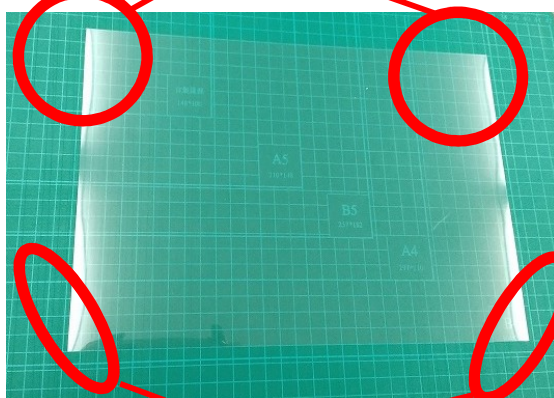


角を切って丸くする

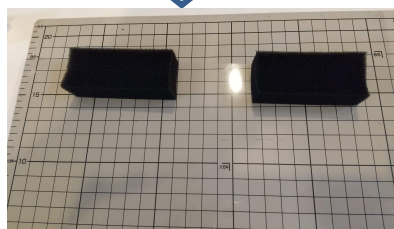

スポンジを適当な大きさに切り、間をあけるようにして2枚貼り付けます。



頭のサイズに合わせてゴムを切り、穴の部分で折り返して両端をスナップボタンで留めます。

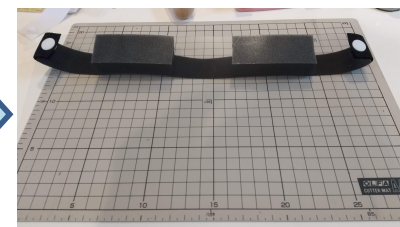

表から見た完成品です。
※スポンジやゴムの長さは使う人の年齢や状況に応じて変えてみてください。

A4透明フィルムのお問い合わせは、
『(株)アイチサイエンス』まで
TEL:0564-22-6420
※価格:100枚 9,800円(税抜)